

Topi-CLICK® Instrucciones de Uso para el Paciente

Lea cuidadosamente toda la información e instrucciones antes de usar el dispensador Topi-CLICK®.



Paso 1:
Para quitar la tapa del envase Topi-CLICK®, coloque el pulgar bajo la extensión de la tapa protectora y presione hacia arriba.



Paso 2:
Gire la base para dispensar el número de CLICKs indicado, según las instrucciones en la etiqueta de su receta.



Paso 3:
Al girar la base, observe los indicadores visuales. Después de cada uso, asegúrese de dejar la base en la posición CLICK registrada, alineando la columna base con el marcador del tubo.



Paso 4:
Aplique frotando la crema que está en la parte superior de la almohadilla al área de la piel, según le indicó el farmacéutico.



Paso 5:
Para evitar la evaporación, coloque la tapa sobre el dispensador después de cada dosis. Asegúrese que la tapa quede bien cerrada.



Paso 6:
La parte inferior del émbolo es la línea indicadora; cuando llegue a la línea en relieve debajo de la palabra "Refill" (recarga), quedan aproximadamente 32 CLICKs. Cuando llegue a la línea sobre la palabra "Refill" (recarga), quedan aproximadamente 12 CLICKs.

Topi-CLICK® es un dispensador de uso único y no recargable. DoseLogix, LLC y/o los titulares de la patente no son responsables de daños causados por los productos dispensados en el Topi-CLICK® o en caso de uso incorrecto.